

VetGlu

VetGlu[®]
斯迈特[®]

P  TS
TISSUE
ADHESIVE

宠物生物组织胶水

派菲特新材料科技有限公司

地址：浙江省宁波市高新区木槿路96号

5#厂房10号门A2-1

电话：+86-574-8756 4800

传真：+86-574-8756 4717

邮箱：sales@perfectseal.com

网址：www.perfectseal.com

派菲特新材料科技有限公司



宠物胶水

是一种宠物专用级别组织粘合剂,可替代动物手术后的缝线缝合

PVG-01 3ml/支

产品特点:

蓝色容易看到已涂抹生物组织胶水的部位,数秒内该产品由液体聚合为固态,封闭伤口止血



毛刷涂抹器 易于使用



PVG-02 1ml/支

产品特点:


蓝色容易看到已涂抹生物组织胶水的部位,数秒内该产品由液体聚合为固态,封闭伤口止血



尖细瓶口 易于使用



使用说明

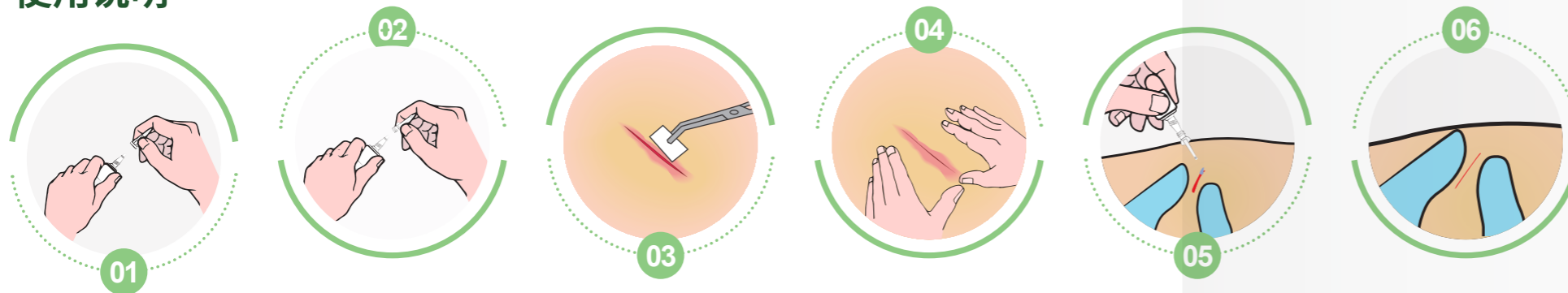

宠物生物组织胶水使用前必须处于室温。

- 1.取下瓶盖
- 2.将涂药器装上,推到位
- 3.将涂药器的尖端指向病宠,将组织粘合剂少量涂在表面,形成薄薄的一层。涂的太厚会使得粘合剂过早开裂,将皮肤边缘拢在一起,保持5-10秒。涂药器尖端 避免接触潮湿表面,不要将宠物生物组织胶水涂在内部或者表皮层下
- 4.手术完成后,检测有无出血。如有必要,重新滴一滴粘合剂在伤口的边缘。

宠物生物组织胶水

是一种宠物专用级别组织粘合剂,可替代动物手术后的缝线缝合

PVG-03 0.7ml/支

产品特点:

蓝色容易看到已涂抹生物组织胶水的部位,数秒内该产品由液体聚合为固态,封闭伤口止血



海绵刷头 易于使用



应用范围

用于宠物手术后把组织粘合起来,例如:撕裂伤,擦伤等伤口的粘合,加强缝线和钉子额外的稳固性,常应用于拔牙以及口腔外科等手术。宠物卵巢摘除绝育手术,残留趾切除,眼外科手术。

撕裂伤擦伤

口腔外科

绝育手术

残留趾切除

眼外科手术